










最小厚み／支台歯形成

- 前歯・臼歯ともに下記の適切な厚みを確保する。
- マージンラインはディープシャンファアとする。
- 鋭角な部分のない丸みのある形態とする。
- 十分な保持が得られる軸面形成とする。
- フィニッシングラインはスムーズに仕上げる。

前歯

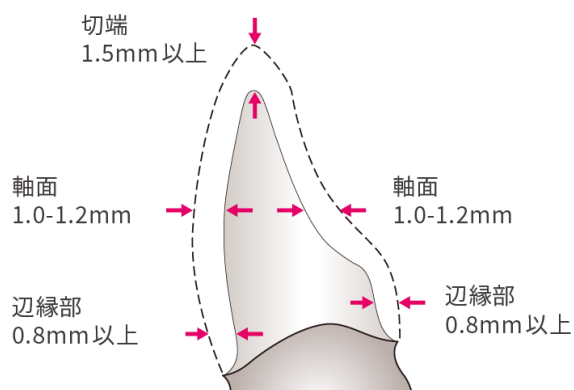

避けるべき支台歯形成

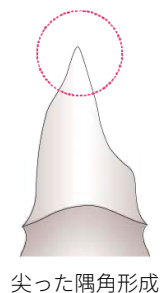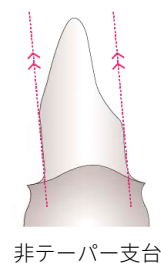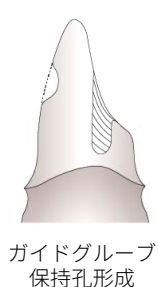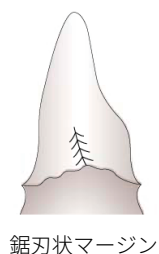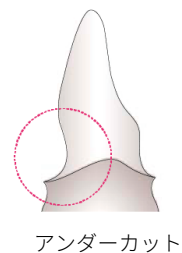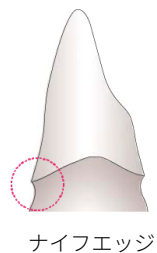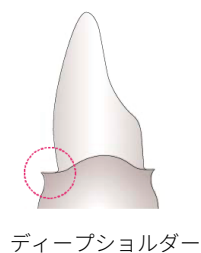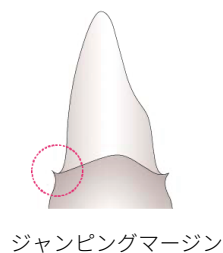

- ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
- 「KATANA」及び「カタナ」は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
- 「アベンシア」は株式会社クラレの登録商標です。

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3
(大手センタービル)
フリーダイヤル：0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL. (06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL. (03) 3834-6161
お客様相談センター：0800-222-8020
<http://www.dental-plaza.com>